


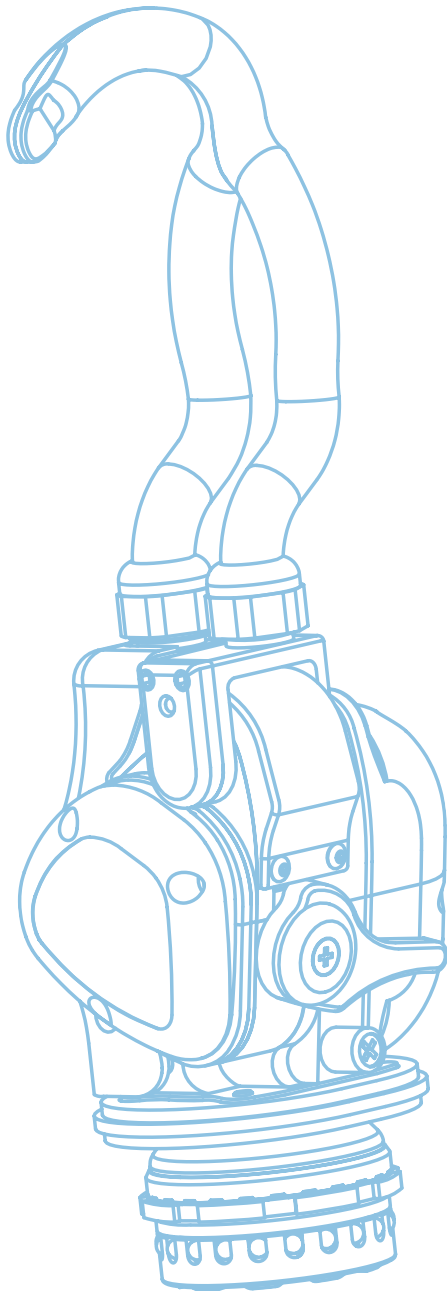

MC ProPlus ETD

Käyttöopas

Fillauer[®]
Motion Control

MC ProPlus ETD


Käyttöopas

Johdanto

Motion Controlin (MC) ProPlus-sähköpäätelaitte (ETD) on tehokas päätelaitte henkilöille, jotka ovat menettäneet yläraajan. MC ETD sisältää akun säästöpiirin, joka pidentää akun käyttöikää, laajasti avautuvat sormet ja ainutlaatuisen turvavapauttimen.

MC ETD on valmistettu kestäväksi laitteeksi käyttäjille, jotka käyttävät sitä paljon. Sormet ovat kevyttä alumiinia, mutta ne ovat saatavilla myös titaanisina lisävahvuutta varten. MC ETD on vedenkestävä IPX7-standardin mukaisesti, minkä ansiosta se voidaan upottaa Quick Disconnect -ranteeseen asti.

MC ProPlus ETD:ssä on erittäin pitkäikäinen harjaton tasavirtamoottori ja sisäänrakennettu ohjain. Tämä monipuolinen mikroprosessori tarjoaa helpon säädettävyyden langattoman Bluetooth®-tiedonsiirron kautta iOS-laitteisiin (iPhone®, iPad® ja iPod Touch®), lukuisia tuloantureita ja korkean suorituskyvyn. MC ProPlus ETD:tä voidaan käyttää muiden MC ProPlus -komponenttien, kuten MC ProPlus -käden, ja muiden valmistajien laitteiden kanssa.

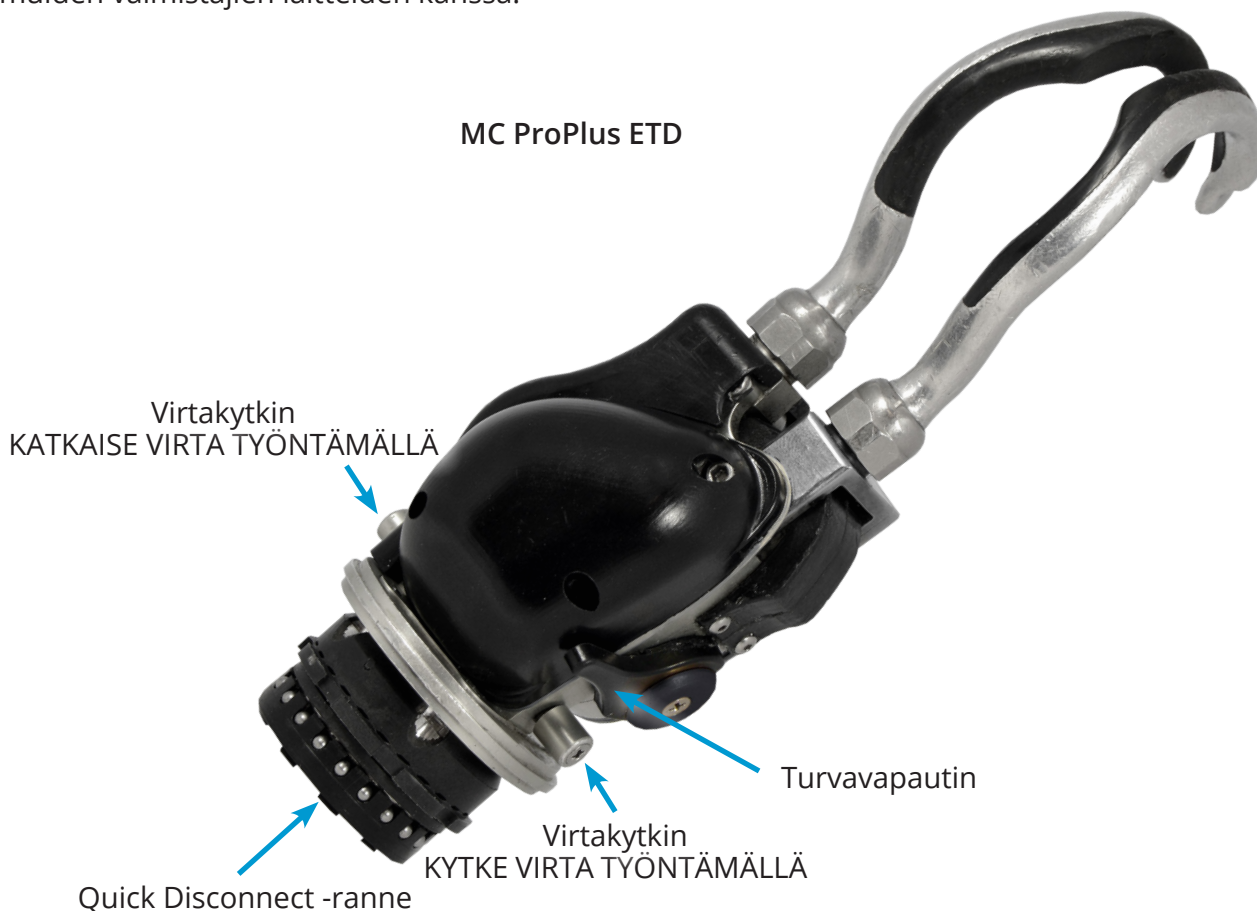

Erityiset varotoimet



Riskienhallinta

Minimoi käyttäjälle koitua laitevaurion tai vamman riski ja maksimoi laitteen toiminnot noudattamalla asennusohjeita ja käyttämällä tätä laitetta käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.



MC ETD on vedenkestävä, ei vesitiivis

Vaikka Motion Control ETD on vedenkestävä, pikairrotettava rannetuki ei ole. Älä upota ETD:tä ranteen syvemmälle.



Syttyvät kaasut

ETD:tä tulee käyttää varoen syttyvien kaasujen lähistöllä. ETD:ssä on sähkömoottori, joka voi sytyttää tulenarkoja kaasuja.



Älä taivuta sormia

Vaikka MC ETD on kestävä, kehonpainolla siihen voi kohdistaa suurta voimaa. Älä kohdistaa täyttä kehonpainoa sormille. Lisäksi pudotus, jossa kaikki voima kohdistuu sormiin, voi aiheuttaa vaurion. Jos sormet taivutuvat tai ovat väärässä asennossa, ota yhteyttä proteetikkaan.



Turvavapautin

Älä pakota ETD:n sormia auki tai kiinni. Tämä johtaa laitteen vaurioitumiseen. Turvavapauttimen avulla ETD:n voi avata ja sulkea helposti. Jos vapautusmekanismi ei salli liikettä, Motion Controlin on huollettava laite.



Korjaukset tai muutokset

Älä yritä korjata tai muuttaa mitään MC ETD:n mekaanisia tai elektronisia komponentteja. Tämä aiheuttaa todennäköisesti vaurioita, lisäkorjauksia ja takuun mitätöitymisen.



Asennus käyttöliittymän avulla

Vaikka MC ProPlus ETD:n oletusasetukset sallivat potilaan käyttää järjestelmää, on suositeltavaa, että proteetikko mukauttaa asetukset käyttäjälle käyttöliittymän avulla.



Turvallisuusvaroit

Ole varovainen, kun käytät tätä laitetta tilanteissa, joissa sinä tai muut saattavat vahingoittua. Näihin tilanteisiin sisältyvät muun muassa ajaminen, raskaan koneiston käyttö tai mikä tahansa aktiviteetti, jossa vamma on mahdollinen. Esimerkiksi akun alhainen varaus tai sen tyhjentymisen, elektrodikontaktin menetys tai mekaaninen/elektroninen vika (ja muut) voivat saada laitteen toimimaan odotetusta poikkeavalla tavalla.




Vakavat vaaratilanteet

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteen käyttöön liittyy vakava vaaratilanne, käyttäjien on käännettävä heti lääkärin puoleen ja otettava ensi tilassa yhteyttä apuvälineteknikkoon, paikalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen ja Fillauer-yhtiöön. Lääkäreiden tulee ottaa välittömästi yhteyttä paikalliseen Fillauer-edustajaan ja paikalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen, jos laite vioittuu.

Virtakytkin

Virtakytkin on ETD:n pohjassa, samalla akselilla sormien avaamisen kanssa. Kun painat kytkintä turvavapauttimen puolella, ETD:n virta kytkeytyy. Vastakkaisen puolen painaminen katkaisee ETD:n virran.

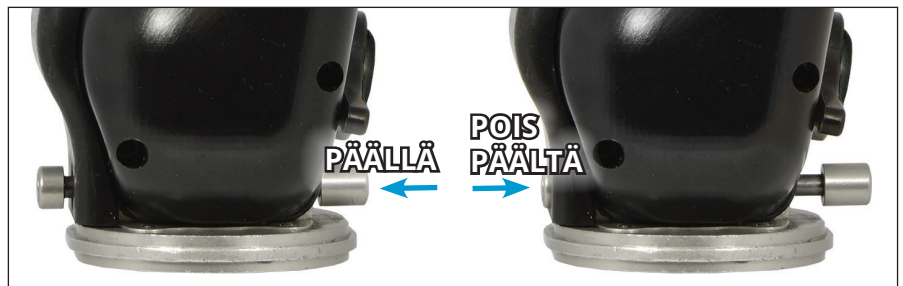

Turvavapautin

Turvavapauttimen työntäminen YLÖSPÄIN irrottaa sormet, ja ETD:n voi avata helposti.



Quick Disconnect -ranne

Quick Disconnect -ranne on universaali malli, joka mahdollistaa keskinäisen vaihdettavuuden muiden päätelaitteiden kanssa, kuten MC ProPlus Hand, ja muiden valmistajien laitteiden kanssa.

Käyttöohjeet

Ennen kuin kiinnität MC ETD:n kyynärvarteeseen, etsi virtakytkin ETD:n pohjasta. Varmista, että se on pois-asennossa (katso sivun 2 kuva).

Kiinnitä Quick Disconnect -ranne ETD:hen kyynärvarren ranteeseen. Työnnä sitä lujasti ja kierrä ETD:tä, kunnes kuulet napsahduksen. On suositeltavaa kääntää ETD:tä molempiin suuntiin useiden napsahdusten ajan ja yrittää sitten vetää ETD:tä irti sen kiinnittymisen varmistamiseksi.

Työnnä nyt virtakytkin vastakkaiseen suuntaan. ETD:n virta on kytketty, ja se on käyttövalmis.

Irrota ETD katkaisemalla ensin sen virta ja kiertämällä sitä sitten kumpaan tahansa suuntaan, kunnes tunnet hieman vaikeamman napsahduksen. Kun jatkat kääntämistä napsahduksen jälkeen, ETD irtoaa kyynärvarresta. Tämä mahdollistaa keskinäisen vaihdettavuuden toisen päätelaitteen kanssa, kuten MC ProPlus -käsi.

Käyttöliittymän säädöt

Kukin Motion Controlin ProPlus-tuoteperheen tuote sisältää mikroprosessorin, jota voi säätää yksilön tarpeita varten. EMG-signaalittomat käyttäjät voivat myös käyttää laitetta, mutta lisälaitteisto saattaa olla tarpeen. Näiden säätöjen tekemiseen tarvittava ohjelmisto toimitetaan ilmaiseksi proteetikolle tai loppukäyttäjälle.

iOS-käyttöliittymä

ProPlus ETD:n ydin päivitettiin vuoden 2025 puolivälissä. Ennen tätä päivämäärää ostetut laitteet käyttävät konfigurointiin Motion Control User Interface (MCUI) -sovellusta. Tämän jälkeen ostetut mallit vaativat Motion Arm User Interface (MAUI) -käyttöliittymän käyttöä asennukseen. Molemmat ovat saatavilla ilmaiseksi Apple Storesta, Android-laitteita ei tueta. Katso laitteesi tiedot ja pika-asennusoppaat käyttöoppaan lopussa.

***Huomautus:** MCUI/MAUI-sovellus *ei* ole saatavilla Android-laitteille.

Potilaan/proteetikon säätimet


Kun iOS-sovellus avataan, sinulta kysytään Patient [Potilas] tai Prosthetist [Proteetikko] – valitse Patient [Potilas]. Voit potilaana navigoida koko sovelluksessa, mutta monet säädöt näkyvät harmaana, sillä vain proteetikko voi muuttaa niitä.

Näet kuitenkin EMG-signaaliesi tai muiden syöttösignaalien vahvuuden, jotta voit harjoittaa näitä lihaksia.

Lisäksi voit muuttaa säätöjä, jotka eivät näy harmaana. Näihin sisältyvät esimerkiksi äänimerkit ja useat FLAG-säädöt (FLAG on valinnainen ominaisuus).

Käyttäjäprofiilit

Voit tallentaa profiilisi iOS-käyttöliittymän User Profile [Käyttäjäprofiili] -kohdassa. On suositeltavaa tallentaa profiilisi laitteellesi. Myös proteetikkoa suositellaan tallentamaan profiilisi laitteelleen. Näin saatavilla on varmuuskopio, jos tarvitaan korjauksia tai laitteistopäivityksiä.

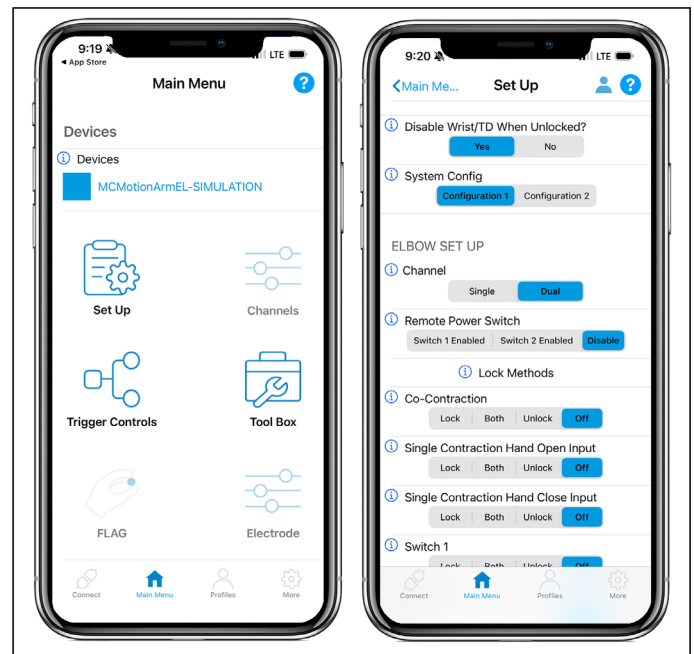

MAUI-päävalikko ja asetusnäytöt. Motion Control UI -sovellus on saatavilla Apple Storesta.

FLAG (valinnainen)

FLAG (Force Limiting [Voiman rajoittaminen], Auto Grasp [Automaattinen ote] eli voimaa rajoittava automaattiotte) on MC ProPlus -käden ja ETD-päätelaitteiden valinnainen ominaisuus. FLAG tarjoaa kaksi toimintoa:

- **Force Limiting [Voiman rajoittaminen]**, jotta esineet eivät murskaudu liiallisen puristusvoiman johdosta
- **Auto Grasp [Automaattinen ote]**, joka lisää hieman otetta esineestä, jos ohjain havaitsee tahattoman avaamissignaalin

Ota FLAG käyttöön/pois käytöstä

Kun virta kytketään, FLAG poistetaan käytöstä. TD on suljettava ja avattava ennen FLAGin käyttämistä. Ota FLAG käyttöön antamalla laitteelle Hold Open [Pidä auki] -signaali (noin 3 sekunnin ajan)**. Kun FLAG otetaan käyttöön, käyttäjä tuntee yhden pitkän värinän. Hold Open [Pidä auki] -signaali (noin 3 sekunnin ajan)** ottaa FLAGin pois käytöstä, ja käyttäjä tuntee kaksi lyhyttä värinää.

Huomautus: Jos käyttäjä tuntee viiden värinän sarjan Hold Open [Pidä auki] -signaalin aikana, FLAG-anturissa saattaa olla toimintahäiriö. Katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen. Avaa ja sulje sitten laite täysin. Anna Hold Open [Pidä auki] -signaali uudelleen aktivoitaksesi FLAGin. Jos tunnet viisi värinää uudelleen, laite toimii, mutta FLAG ei ole käytössä. Laite on palautettava Motion Controlille, jotta FLAG-anturi voidaan korjata.

Kaksikanavainen FLAG

Force Limiting [Voiman rajoittaminen]

1. Kun FLAG on käytössä, sulkeminen on silti suhteellista ja enimmäisnopeutta lasketaan 50 %**.
2. Kun sormet suljettaessa koskettavat esinettä, voimaksi rajoitetaan noin 1 kg / 9 N (2 lbs / 9 N) otevoimasta – sitten käyttäjä tuntee yhden lyhyen värinän.
3. Voimaa lisätäkseen käyttäjä rentoutuu kynnsarvon alle, antaa vahvan sulkusignaalin** lyhyeksi aikaa** ja seurauksena otevoima ”sykähdyttää” voimakkaammaksi.
4. Otevoimaa voi kasvattaa sykähdyksittäin enintään 10 kertaa enimmäispuristusvoimaan ~8 kg / 80 N (18 lbs / 80 N)**.
5. Auki-signaali avaa päätelaitteen suhteellisesti.

Auto Grasp [Automaattinen ote]

Kun FLAG on käytössä, nopea, huomaamaton avaamissignaali johtaa otevoiman kasvamiseen yhden sykäyksen verran, jotta kädessä oleva esine ei putoa.**

Yksikanavainen FLAG

Yksikanavaisen säätimen kanssa FLAGia kannattaa käyttää vaihtosuunnan ohjaustilassa.

Force Limiting [Voiman rajoittaminen]

1. Kun FLAG on käytössä, päätelaite sulkeutuu noin 50 %:n nopeudella** suhteellisesti.
2. Kun laite koskettaa esinettä, voimaksi rajoitetaan noin 1 kg / 9 N (2 lbs / 9 N).
3. Nopea ja voimakas kynnsarvon ylittävä signaali** ja rentouttaminen kynnsarvon alapuolelle luo voimaan yhden sykäyksen**.
4. Tämä voidaan toistaa enintään 10 kertaa puristusvoimalle, joka on noin 8 kg / 80 N (18 lbs / 80 N).
5. Noin sekunnin kestävä jatkuva signaali avaa päätelaitteen.

Auto Grasp [Automaattinen ote]

Kun FLAG on käytössä, nopea, huomaamaton signaali sulkee päätelaitteen ja estää esinettä putoamasta.

****Huomautus:** Näitä asetuksia voi säätää iOS MCUI-sovelluksessa

2-CHANNEL SETTING	ACTION	FEEDBACK
Turn On	Hold Open 2-3 seconds	Buzz
Close to Grip	Close signal ± 1 second	Short Buzz
Pulse force up	Close signal ± 1 second	Short Buzz
Turn Off	Hold Open 2-3 seconds	Double Buzz

1-CHANNEL SETTING	ACTION	FEEDBACK
Turn On	Signal 2-3 seconds	Buzz
Close to Grip	Signal ± 1 second	Short Buzz
Pulse force up	Quick Signal ± 1 second	Short Buzz
Open	Strong Signal 2-3 sec.	None, direction will reverse as usual
Turn Off	Open the hand then Signal 2-3 seconds	Double Buzz

MCUI-käyttöliittymä iOS:lle

Pika-asennusopas

Pika-asennusopas Apple® iOS -käyttöjärjestelmälle tarkoitetulle Motion Control -käyttöliittymälle (MCUI)

1. Lataa ja asenna MCUI  Apple® App Storesta .
2. Valitse Patient [Potilas].
3. Avaa sovellus ja noudata opetusohjelmaa.
4. Siirry Connect [Yhdistä] -näyttöön  ja valitse Scan [Skannaa]. .
5. Anna Pairing Key (Laiteparin muodostusavain). **Proteetikkosi antaa tämän.**
6. Laite on nyt yhdistetty MCUI:hin.
7. Katkaise yhteys napauttamalla vasemman alakulman yhdistämiskuvaketta  ja napauta sitten Disconnect [Katkaise yhteys]. .

Järjestelmävaatimukset

Apple® App Store -tili ja mikä tahansa seuraavista laitteista:

- iPad, iPhone tai iPod Touch, jossa on iOS 11 tai uudempi.

Ongelmanratkaisu

- Varmista, että laitteen akku on täysin ladattu
- Tarkista laitteen liitäntä pikairrotettavassa ranteessa
- Varmista, että laite on päällä
- Varmista, että et ole "Tutorial Mode" [Opetustilassa] napauttamalla kahdesti kotipainiketta, pyyhkäisemällä sitten MCUI ruudulta ja avaamalla MCUI uudelleen
- Bluetooth® on otettava käyttöön kohdassa Asetukset  iOS-laitteessa
- Tiedot-kuvake  antaa tietoja toiminnosta
- Voit toistaa opetusohjelman valitsemalla  ja napauttamalla Nollaa Nollaa ohjattu opetusohjelma

*Laitteiden konfigurointia varten ennen vuoden 2025 puoliväliä. Katso oma laitteesi. Myös AutoCal-toiminto on poistettu käytöstä. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

MAUI-sovellus iOS:lle

Pika-asennus: Motion Arm User Interfacelle Apple® iOS:lle (MAUI)

- Apple® App Storesta  lataa MAUI-sovellus. 
- Valitse Potilas, kun sinulta kysytään. Potilaat eivät tarvitse koodia.
- Avaa sovellus ja noudata opetusohjelmaa.
- Siirry Yhdistä-näytölle  ja napauta Skannaa. 
- Syötä laitteen mukana toimitettu paritusavain.
- Laite on nyt kytketty MAUI-sovellukseen.
- Katkaise yhteys napauttamalla Yhdistä-kuvaketta vasemmassa alakulmassa  ja napauta sitten Katkaise yhteys. 

Vianmääritys

- Varmista, että laitteen akku on ladattu täyteen
- Vahvista, että laite on päällä
- Varmista, että et ole "simulointitilassa", kaksoisnapauttamalla Koti-näppäintä, pyyhkäisemällä MAUI pois näytöltä ja avaamalla sovellus uudelleen
- Bluetooth® on kytkettävä päälle asetuksissa  iOS-laitteesta
- Tietokuvake  antaa tietoja toiminnosta
- Toista opetusohjelma siirtymällä kohtaan  ja napauttamalla **Nollaa** Nollaa ohjattu opetusohjelma.

Laitteistovaatimukset

- iPad, iPhone tai iPod Touch, jossa on iOS 11 tai uudempi.



Download the
MAUI software on
the Apple Store.

*Vuoden 2025 puolivälin jälkeen julkaistujen laitteiden konfigurointia varten. Katso omaa laitettasi koskevat tiedot. Myös AutoCal-toiminto on poistettu käytöstä. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

Käyttö yhdelle potilaalle

Jokainen amputointipotilas on ainutlaatuinen. Tyngän muoto, ohjaussignaalit ja amputointipotilaan tekemät arkiaskareet edellyttävät, että proteesi on suunniteltu ja säädetty hänelle sopivaksi. Motion Control -tuotteet valmistetaan sopivaksi yhdelle käyttäjälle.

Hävittäminen/jätteenkäsittely

Tämä laite on hävitettävä sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Tämä sisältää tarvittaessa bakteereja tai tartuntatauteja koskevat lait ja määräykset.

Rajoitettu takuu

Myyjä takaa ostajalle, että tässä yhteydessä toimitetut laitteet ovat materiaaaliltaan ja valmistuslaadultaan virheettömiä, vastaavat kuvattua tyyppiä ja laatua sekä toimivat myyjän kirjallisessa tarjouksessa määritetyllä tavalla. Nämä rajoitetut takuut koskevat vain sellaisia takuuehtojen täyttymättä jäämisiä, jotka ilmenevät tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Voimassaoloaika on kaksi vuotta (24 kuukautta*) siitä päivästä lukien, jolloin laitteet toimitettiin komponentit ostaneeseen asennusliikkeeseen. Lähetyspäivämäärä käy ilmi lähetyskuitista. *24 kuukauden takuu koskee laitteita, jotka on ostettu 1.1.2026 jälkeen.

Palautuskäytäntö

Palautukset hyväksytään täyteen hyvitykseen 90 päivän kuluessa lähetyspäivästä, kunhan tuote on jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa. Yli 90 päivän palautusoikeutta ei hyväksytä.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila: -5...60 °C (23...140 °F)

Kuljetus- ja säilytyslämpötila: -18...71 °C (0...160 °F)

Puristusvoima: Arvossa 7,2 voltia, nimellinen: 11 kg (24 lbs tai ~ 107 N)

Käyttöjännitealue: 6–8,2 Vdc - MC ProPlus ETD

Kuormitusraja: 22 kg (50 lbs) kaikissa suunnissa (+/-10 %)

Laitteen käyttöikä: 5 vuotta

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote noudattaa lääkinnällisten laitteiden asetusta (MDR) 2017/745 ja se on rekisteröity Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastossa. (Rekisteröintinro 1723997)



Motion Control Device Patent Information: US 10,004,611 B2; US 7,438,724 B2; US 7,914,587 B2; US 7,114,430 B2 (exp); US 7,041,141 B2 (exp)

Customer Support

Americas, Oceania, Japan

Fillauer Motion Control

115 N. Wright Brothers Drive
Salt Lake City, UT 84116
+1 801-326-3434
motioninfo@fillauer.com

Europe, Africa, Asia

Fillauer Europe

Kung Hans väg 2
192 68 Sollentuna, Sweden
+46 (0)8 505 332 00
support@fillauer.com



www.fillauer.com



Fillauer

2710 Amnicola Highway
Chattanooga, TN 37406
+1 423.624.0946



Fillauer Europe

Kung Hans väg 2
192 68 Sollentuna, Sweden
+46 (0)8 505 332 00



© Fillauer Motion Control, 1910073 07-15-26